

apriline®
FILLER

KLINISCHE STUDIE



STUDIENDESIGN

ZIEL:

Um die Effizienz, Haltbarkeit und Effektivität von Apriline Forte beurteilen zu können, wurden 50 moderate bis starke Nasolabialfalten über einen Zeitraum von neun Monaten behandelt.

SCHLUSSEFOLGERUNG:

Klinische Testergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen und Langlebigkeit des Produkts während der neun Monate.


KLINISCHES PROTOKOLL

- 25 gesunde Patienten, durchschnittliches Alter 54
- Benutztes Produkt: **Apriline Forte**
- Injektionsgebiet: linke und rechte Nasolabialfalte
- Injektionsvolumen: 0,8 ml pro Seite
- Injektionstechnik: retrograde Technik (Nadel)
- Evaluation: nach 1, 2, 3, Monaten und 9 Monaten

Unabhängige klinische Studie, durch GREDECO Research Association in Frankreich. Geführt von Dr. Boisnic und Dr. Pressian Paraskevov. Letzterer führte alle Injektionen durch.

apriline[®] FORTE

HOHE PATIENTENZUFRIEDENHEIT*

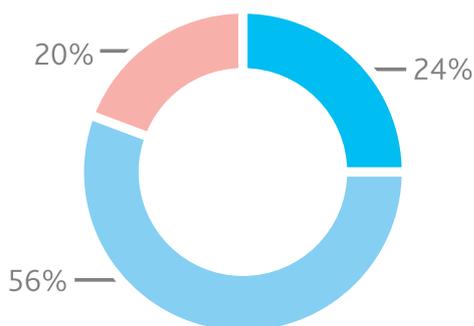


SEHR GUTE
VERBESSERUNG

DEUTLICHE
VERBESSERUNG

SICHTBARE
VERBESSERUNG

HOHE ZUFRIEDENHEIT DER ÄRZTE**

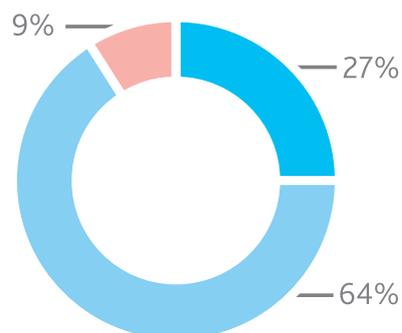

SEHR HOCH

HOCH

MITTEL

* Die Ergebnisse stammen aus einer Patientenbefragung am 60. Tag ihrer Behandlung. Sie sollten den Effekt des Produktes mit -1 „Verschlechterung“ bis 3 „deutliche Verbesserung“ bewerten


** Ergebnisse dem Post-Marketing-Monitoring 2017 mit einer Skala von 0 „niedrig“ bis 4 „sehr hoch“

KLINISCH GEPRÜFTE EFFIZIENZ

KLINISCH GEPRÜFTE EFFIZIENZ

KLINISCHE EVALUATION DER TIEFE DER NASOLABIALFALTE MIT HILFE DER WSRS METHODE*

Mit nur einer Behandlung

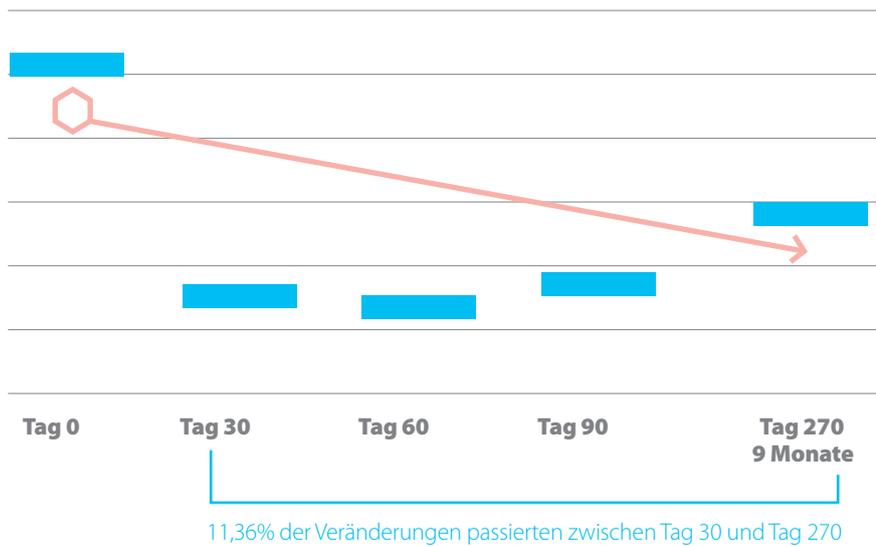


■ Rückgang der Tiefe der Nasolabialfalte in Prozent
 ⬡ Linear (Rückgang der Tiefe der Nasolabialfalte)

58%

Die Tiefe der rechten Falte ist deutlich verringert

BEURTEILUNG DER TIEFE DER NASOLABIALFALTE MIT HILFE EINER BILDANALYSE MIT EINER BEHANDLUNG**

Ohne erneute Behandlung

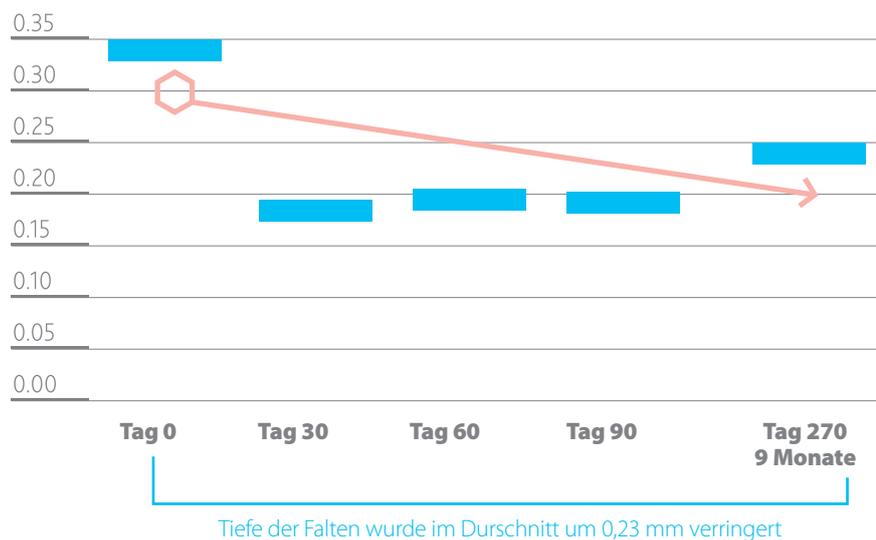

■ Rückgang der Tiefe der Nasolabialfalte in Prozent
 ⬡ Linear (Rückgang der Tiefe der Nasolabialfalte)

Geringer Abbau des Produkts startet nach 9 Monaten. Das Produkt ist immer noch

80%
vorhanden.

* Klinische Evaluation, durch Dr. Boisnic, mithilfe der Wrinkle Severty Rating Scale Methode (WSRS) 0 bis 5.

** Profilometrische Evaluation, durchgeführt mit dem LifeViz micro (Messung der durchschnittlichen Tiefe in Millimeter). Die dargestellte Grafik bezieht sich auf die rechte Falte.

LANGANHALTENDE ERGEBNISSE



VORHER



NACHHER

Dr. Pressian Paraskevov:

„Ich benutze Apriline Produkte jetzt schon drei Jahre. Das einfache Injizieren, die Effizienz und die langanhaltenden Ergebnisse haben mich und meine Patienten überzeugt.“

Dr. Nikolaus Linde:

„Ich mag die Konsistenz der Apriline Filler, durch sie wird das Produkt sehr gut vom Gewebe aufgenommen. Sogar für Anfänger sind Apriline Filler sehr einfach zu benutzen. Für mich ist es das perfekte Produkt.“



VORHER




NACHHER

9 MONATE
ERWIESENE
WIRKUNG

HOHE TOLERANZ*

* Nur 5 von 25 behandelten Personen hatten nach der Injektion Hautrötungen an der Stelle

DIE WISSENSCHAFT HINTER APRILINE FILLERN

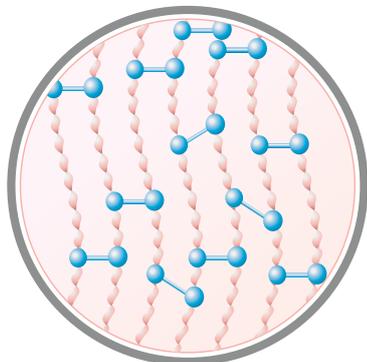

100% EFFIZIENTES MONOPHASISCHES QUERVERNETZTES HYALURONSÄURE GEL, HERGESTELLT DURCH DIE EINZIGARTIGE **A.P.R.I. TECHNOLOGIE**

A.P.R.I. Technologie passt die räumliche Struktur der HA-Moleküle durch die Verbindung zweier HA-Makromoleküle durch BDDE an.

A.P.R.I. Technologie versichert eine 100%ige effektive Selbstvernetzung der HA.

HOHE VISKOSITÄT UND ELASTIZITÄT




EINFACHES INJIZIEREN UND REST BDDE

LANGER LIFTING – UND STABILISIERUNGSEFFEKT

apriline[®]
FORTE

apriline[®]
NORMAL

apriline[®]
HYDRO

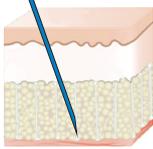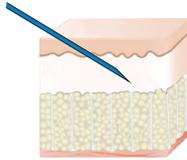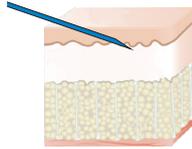Indikation	Tiefe Falten und Furchen sowie Gesichtskontur	Universeller Filler: mäßige Furchen und Fältchen im Gesicht	Kleine Fältchen, oberflächliche Furchen, Verbesserung der Hauttraffheit und Elastizität
Injektionstiefe	Untere Hautschicht, Subkutis, unter der Schleimhaut 	Mittlere bis tiefe Dermis 	Oberflächliche Dermis 
HA-Konzentration in ml/mg	23	23	18
Gewicht des Moleküls, Mda	2.5 – 3	2.5 – 3	3
pH	6.8 – 7.4	6.8 – 7.4	6.8 – 7.6
Dynamische Viskosität	~ 1,000,000	~ 500,000	~ 150,000
Elastizität G', mPa	~ 225,000	~ 84,000	
Injektionsstärke	~ 14.90	~ 13.80	
BDDE, ppm	0.4	0.4	
Nadel	2 x 27G 1/2	2 x 27G 1/2	2 x 30G 1/2
Länge des Effekts, Monate	8-12	6-10	3 to 6

apriline®

Filler ■ Mesotherapie ■ Hautpflege



<https://shop.forbex.de>